



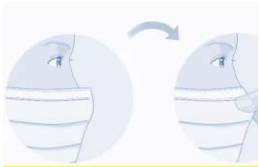

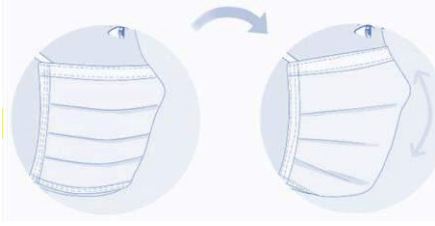


PROCEDURA CORRETTO UTILIZZO DELLA MASCHERINA FILTRANTE

COME INDOSSARE LA SEMIMASCHERA FILTRANTE			
			
<p>1 Inserire gli elastici nelle fibbie, tenete il facciale in mano, stringinaso verso le dita elastici in basso</p>	<p>2 · facciale sotto al mento; · elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie; · elastico superiore dietro la testa e sopra le orecchie. NON ATTORCIGLIARE</p>	<p>3 Regolare la tensione della bardatura tirando all'indietro i lembi degli elastici .</p>	
			
<p>4 Usando ambedue le mani modellare lo stringinaso</p>	<p>5 Per allentare la tensione premere sull'interno delle fibbie dentate .</p>	<p>6 Verifiacare la tenuta del facciale prima di entrare nell'area di lavoro</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone* o con una soluzione alcolica
	<ul style="list-style-type: none"> • coprire bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto
  	<p>per le mascherine con <i>anelli (elastici) alle orecchie</i>: prendere questo tipo di mascherina per gli anelli, metterne uno intorno a un orecchio e poi il secondo sull'altro orecchio.</p> <p>per le mascherine con <i>due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e alla nuca</i>: tenere la mascherina davanti al viso, tirare la fascia superiore e metterla intorno alla parte superiore della testa. Tirare poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca. (vedi figura)</p> <p>si ricorda che per le FFP2 e FFP3 tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano</p>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usa entrambi gli indici delle mani per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte del naso <p>si ricorda che per le FFP2 e FFP3 utilizzare sempre 2 mani per far aderire la mascherina al naso, Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento <p>Solo per FFP2 e FFP3: La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro. Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione. Espirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del</p>
---	--

IMPORTANTE!

L'uso delle mascherine deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria. Va infatti sempre ricordato che nessuna misura da sola può fornire una protezione completa nei confronti delle infezioni ma soltanto una serie combinata di azioni può ridurre il rischio di infezione.